

# activity chair.



 rifton.

## Gebruiksaanwijzing.

**activity chair.** De dynamische eet-/werkstoel.

  
**schuchmann®**

Hartelijk dank.



### **Geachte cliënte, geachte cliënt,**

Wij willen u hierbij hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de aanschaf van ons product. We vragen u om de gebruiksaanwijzing vóór de eerste ingebruikname van het product aandachtig te lezen en in acht te nemen. Houdt u er rekening mee dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing door de uitvoering van uw product kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

### **Belangrijke informatie!**

Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw **Schuchmann**-team



<b>1. Voorbereiding. ....</b>	<b>05</b>
1.1 Uitlevering .....	05
1.2 Veiligheidsmaatregelen vóór het gebruik .....	05
1.3 Veilig verwijderen.....	05
1.3.1 Verpakking.....	05
1.3.2 Product.....	05
1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing.....	05
<b>2. Productbeschrijving. ....</b>	<b>06</b>
2.1 Materiaalinformatie .....	06
2.2 Handling/transport.....	06
2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften.....	06
2.3.1 Indicatie .....	06
2.3.2 Contra-indicatie.....	07
2.4 Oneigenlijk gebruik/Waarschuwingen .....	07
2.5 Uitrusting basismodel .....	07
2.6 Lijst met toebehoren .....	08
2.7 Productoverzicht.....	08
<b>3. Instellingen. ....</b>	<b>09</b>
3.1 Rug .....	09
3.2 Rughoek .....	10
3.3 Poten (kort/lang) .....	10
3.4 Afneembare zitunit.....	11
3.5 Zitgordel.....	12
3.6 Zitdiepte.....	12
3.7 Zithoogte .....	12
3.8 Kussen .....	12
<b>4. Toebehoren. ....</b>	<b>13</b>
4.1 Handgrepen .....	13
4.2 Armleuningen .....	14
4.3 Dynamiek .....	14
4.3.1 Dynamische rug.....	15
4.3.2 Dynamische zittingkanteling .....	16
4.4 Looprollen met remmen .....	17
4.5 Hi/Lo-onderstel .....	17
4.6 Voetenbank.....	18
4.7 Hoofdsteun.....	19
4.8 Rommelotten.....	19
4.9 Borstgordel.....	20
4.10 Borst-schoudergordel .....	20
4.11 Dijbeengordel.....	21
4.12 Zitbroek.....	21
4.13 Dijbeensteunen .....	22
4.14 Abductiewig.....	22



# Inhoud.

4.15 Knie-zijgeleider.....	23
4.16 Knie-steunkussen.....	23
4.17 Enkelpositioneringshulp.....	24
4.18 Sandalen en wiggen.....	24
4.19 LWS-ondersteuning en zitbeenranden.....	25
4.20 Rugverlenging.....	25
4.21 Werkblad.....	26
4.22 Handgreep.....	26
4.23 Schuifgrepen.....	27
4.24 Voetenbank-verhoging.....	27
4.25 Minikit.....	28
<b>5. Reinigen en inspectie. ....</b>	<b>29</b>
5.1 Reinigen en desinfecteren.....	29
5.1.1 Reiniging.....	29
5.1.2 Desinfectie.....	29
5.2 Inspectie.....	29
5.3 Onderhoud.....	29
5.3.1 Aandachtspunten onderhoud.....	30
5.3.2 Onderhoudsplan.....	30
5.4 Reserveonderdelen.....	31
5.5 Gebruiksduur en hergebruik.....	31
<b>6. Technische gegevens. ....</b>	<b>32</b>
<b>7. Garantie. ....</b>	<b>32</b>
<b>8. Identificatie. ....</b>	<b>33</b>
8.1 EU-conformiteitsverklaring.....	33
8.2 Serienummer/Productiedatum.....	34
8.3 Productversie.....	34
8.4 Uitgave van het document.....	34
8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer.....	34

# 1. Voorbereiding.

## 1.1 Uitlevering

Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid en gebreken te controleren en let op eventuele transportschade. Controleer het product in aanwezigheid van de bezorger. Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Stuur een schriftelijke reclamatie naar de verantwoordelijke dealer.

## 1.2 Veiligheidsmaatregelen vóór het gebruik

Het correcte gebruik van het product vraagt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de gebruiker of de begeleidende persoon. We vragen u om de gebruiksaanwijzing vóór de eerste ingebruikname van het product aandachtig te lezen en in acht te nemen. De mogelijkheid bestaat, dat de productonderdelen die met de huid in aanraking kunnen komen, warm kunnen worden door zonnestralen. Bedek deze plaatsen of bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.

## 1.3 Veilig verwijderen

Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuverontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwijderingsinstructies in de **punten 1.3.1** en **1.3.2** in acht te nemen.

### 1.3.1 Verpakking

De verpakking van het product dient voor een eventueel toekomstig, noodzakelijk transport te worden bewaard. Wanneer u het product voor reparatie of in geval van een garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien mogelijk, de originele doos gebruiken, zodat het product optimaal verpakt is. Breng in andere gevallen het verpakkingsmateriaal per soort naar de recycling.



**Laat het verpakkingsmateriaal niet zonder toezicht, omdat het mogelijk een bron van gevaar vormt.**

### 1.3.2 Product

Voer na verstrijken van de levenscyclus van het product de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling (zie materiaal informatie onder **punt 2.1**).

## 1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat deze in geval van een mogelijk hergebruik bij het product blijft. Bij verlies van de gebruiksaanwijzing kan te allen tijde een actuele versie worden gedownload onder [www.schuchmann.de](http://www.schuchmann.de).



## 2. Productbeschrijving.

### 2.1 Materiaalinformatie

Het basisframe is van staal en aluminium gemaakt, corrosievrij en gelakt. De kussendelen bestaan voor 100% uit polyurethaan en zijn brandvertragend (conform DIN EN 1021-1+2). De gordels bestaan uit polypropyleen of nylon. De houten onderdelen zijn van berken multiplex, ahorn of houtfineer, gelakt met polyurethaan.

### 2.2 Handling/transport

De eet-/werkstoel is niet bedoeld om te worden gedragen. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen worden, dan dient u zich ervan te vergewissen dat alle bewegende delen zijn vastgezet. Ga vervolgens naast de eet-/werkstoel staan, pak deze voor en achter onder het zitgedeelte vast en draag hem naar de gewenste plaats. Indien uw eet-/werkstoel van dubbele looprollen is voorzien, dan kunt u hem duwen. Voor het transporteren van de eet-/werkstoel, stelt u alle instellingen op de meest compacte maat in (voetensteun opklappen, zithoogte in de laagste stand, etc.).



**Zet alle beweegbare onderdelen vast voordat u de eet-/werkstoel gaat dragen!**



**De gebruiker mag zich tijdens het transport niet in de eet-/werkstoel bevinden!**

### 2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften

De eet-/werkstoel **activity chair**. is een medisch product voor risicoklasse 1 en is ontworpen gebruik thuis, op de kleuterschool en op school. Hij is te gebruiken voor alle leeftijdscategorieën van kleine kinderen tot jongeren. Individueel instelbare zitmaten en ondersteunende pelotten zorgen voor een stabiele en rechte zithouding. Een ander of daaraan voorbijgaand gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd.

#### 2.3.1 Indicatie

De eet-/werkstoel **activity chair**. is ontworpen voor:

- kinderen met stereotype bewegingen (bijv. rocking), die hun bewegingsdrang en hun opwinding ook bij het zitten vertonen.
- kinderen met dystone vormen van cerebrale parese, die hun onvrijwillige bewegingspatronen niet kunnen controleren.
- bewegingsarme/hypotone kinderen van wie de bewegingsimpulsen door de stoel worden versterkt.

## 2. Productbeschrijving.

### 2.3.2 Contra-indicatie

Over het algemeen dient de indicatie van medisch-orthopedische zijde te worden begeleid. Daarom dient in dit verband voor de zorg helder te zijn of er contra-indicaties bestaan ten aanzien van de gebruiker. Over het algemeen is elke vorm van pijn een contra-indicatie.



### 2.4 Oneigenlijk gebruik/Waarschuwingen

- Let op, dat de eet-/werkstoel door slechts één gebruiker wordt gebruikt.
- Gebruik de eet-/werkstoel alleen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Gebruik de eet-/werkstoel niet voor transport van personen.
- Om de eet-/werkstoel tijdens het transport veilig op te kunnen tillen, gaat u zijdelings naast de eet-/werkstoel staan en pakt u deze voor en achter bij het zitvlak vast. Daarbij moeten alle beweegbare delen zijn vastgezet.
- Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in de eet-/werkstoel zitten.
- Het correcte gebruik van de eet-/werkstoel vergt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon.
- De maximum belasting (zie **punt 6**) mag niet worden overschreden.
- Gebruik de eet-/werkstoel niet met defecte, versleten of ontbrekende onderdelen.
- Omwille van de brandveiligheid mag de eet-/werkstoel niet in de omgeving van een open vuur of een andere sterke warmtebron zoals elektrische of gasverwarming worden geplaatst.
- Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen van firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt.
- Gebruik de eet-/werkstoel alleen, als alle componenten correct zijn aangebracht en ingesteld.
- Er dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.
- Gebruikers die problemen hebben met zien of lezen moeten zich de gebruiksaanwijzing laten voorlezen om veilig met de eet-/werkstoel om te kunnen gaan.

### 2.5 Uitrusting basismodel

- Zit- en rugunit incl. kussen
- Rughoekverstelling met gasdrukveer van (-)5° tot 20°
- incl. 2-punts-bekkengordel
- Basisframe met poten, in hoogte verstelbaar
- Zithoekverstelling met gasdrukveer van (-)15° tot 15°
- Framekleur: effect-zwart



## 2. Productbeschrijving.

### 2.6 Lijst met toebehoren

- Dubbele looprollen (lang of kort)
- Armleuningen
- Heupelotten
- Hoofdsteen (standaard/schelpvormig)
- Rompelotten (met borstgordel)
- Werkblad
- Schuifgrepen
- Abductiewig
- Knie-zijgeleider
- Knie-steunkussen
- Rugverlenging
- LWS-ondersteuning + zitbeenderanden
- Voetenbank
- Enkelpositioneringshulpen
- Sandalen met voetriemen
- Wiggen
- Positioneringshulpen

### 2.7 Productoverzicht

Onderstaande afbeelding toont u de benaming van de belangrijkste componenten, evenals de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruiksaanwijzing tegenkomt.



## 3. Instellingen.


Instellingen en afstellingen van het product mogen alleen maar worden uitgevoerd door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur medische producten. Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.



**Aanwijzing: alle witte hendels en knoppen bieden in- en verstelmogelijkheden!**

### 3.1 Rug

De rugunit is in hoek en hoogte verstelbaar. Om de hoek van de rug in te stellen, drukt u op de witte hendel (A) en brengt u de hoek van de rug in de gewenste positie. De hendel klikt automatisch vast als u deze los laat. Voor het instellen van de rughoogte, drukt u op hendel (B) en brengt u de rug op de gewenste hoogte. Als u de hendel los laat moet de rug hoorbaar vastklikken!

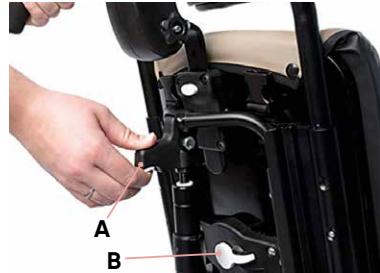

**Let op, dat de rugunit abrupt naar beneden valt, wanneer u hendel (B) draait en de unit niet vasthoudt!**




**Let er op, dat bij het instellen/verstellen van de rug geen lichaamsdelen in het bereik van het instel-/ verstelmechanisme terechtkomen, om mogelijk letsel te voorkomen!**

## 3. Instellingen.

### 3.2 Rughoek

De rughoek kan van  $-15^{\circ}$  tot  $15^{\circ}$  worden ingesteld. Houd daarvoor met één hand schuifgreep (A) vast, met de andere hand drukt u veiligheidsslot (B) omlaag en kantelhendel (C) omhoog. Nu kan de rugunit in de gewenste positie worden gebracht. Gradenweergave (D) aan de zijkant van de **activity chair**. geeft aan hoe de rughoek is ingesteld.

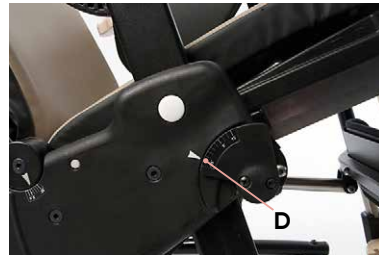

### 3.3 Poten (kort/lang)

De poten kunnen in vijf hoogtes worden ingesteld. Voor het verstellen van de hoogte drukt u op knop (E) en laat deze op de gewenste hoogte hoorbaar in de uitsparingen klikken. U verwijdert de poten door knop (E) in te drukken en de poten compleet uit de opname te trekken. Dit proces herhaalt u voor alle vier de poten.



## 3. Instellingen.

### 3.4 Afneembare zitunit

De zitunit van de **activity chair**. is afneembaar en kan snel op een ander onderstel worden gemonteerd.

#### Afnemen van de zitunit



Als eerste verwijdert u buis (A), die naar de voetenbank loopt. Hiervoor bedient u de witte knop (B) en trekt u de buis uit de buisopname (C). Indien mogelijk, blokkeert u de looprollen (zie **punt 4.4**) en verwijdert u de armleuning (zie **punt 4.2**). Voor het verwijderen van de zitunit, trekt u de beide witte hendels (D) naar voren en tilt u de zitunit voorzichtig omhoog. Zo draait u de zitunit los van dwarsstang (E).

#### Plaatsen van de zitunit:

Schuif zitbeugel (F) onder de klemmen (G) en druk de zitunit van voren krachtig omhoog, tot ze hoorbaar vastklikt. Breng, indien aanwezig, de voetenbank weer aan, door op de witte knop (B) te drukken en de buis in de buisopname (C) te steken, totdat deze hoorbaar vastklikt. Vervolgens kunnen de armleuning opnieuw worden gemonteerd (zie **punt 4.2**).



**Indien mogelijk verwijdert u de zitunit van de activity chair. altijd met zijn tweeën!**

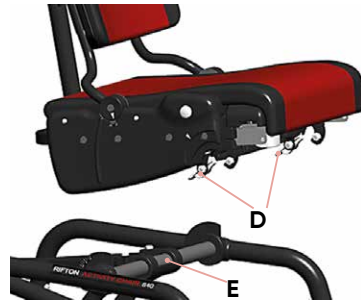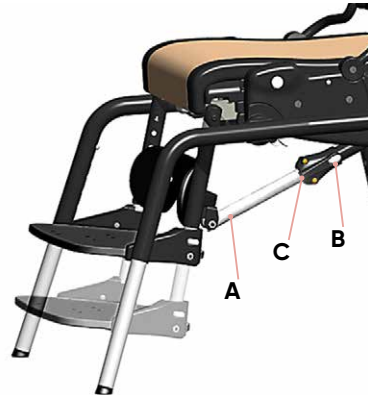


## 3. Instellingen.

### 3.5 Zitgordel

De zitgordel ondersteunt de gebruiker bij het zitten in de eet-/werkstoel en verbetert de houding. Voor het bevestigen of verwijderen van de zitgordel,

drukt u met een stift o.i.d. de witte knoppen **(A)** onder de sleuven **(B)** volledig in en steekt u de gordel erin of trekt u hem eruit. Waar u de zitgordel insteekt hangt o.a. van de grootte van de gebruiker af. Steek de metalen beugel **(C)** met de L-vorm naar voren in één van de sleuven **(B)** en druk deze

erin. Controleer of de gordel vastzit door eraan te trekken. Herhaal dit proces aan de andere kant.

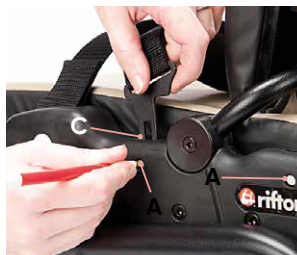

**Bij de gordels bestaat kans op verwuring! Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in de activity chair. zitten!**

### 3.6 Zitdiepte

De zitdiepte kan worden ingesteld door aan de witte greep **(D)** te trekken. Nu kunt u de zitting in de gewenste positie brengen. De zitting moet na het instellen hoorbaar vastklikken!



### 3.7 Zithoogte

De zithoogte wordt via de poten/looprollen ingesteld (zie **punt 3.3** of **4.4**). Daarnaast kan de zithoogte bij de uitvoering met een Hi/Lo-onderstel worden veranderd (zie **punt 4.5**)

### 3.8 Kussen

De kussendelen kunnen met drukknoppen aan het rugdeel worden bevestigd, of door het draait van de drukknoppen worden verwijderd (zie **pijltes**). Het zitkussen kan met twee drukknoppen onder de voor- en achterkant van de zitting worden bevestigd of verwijderd.



## 4. Toebehoren.

### 4.1 Handgrepen

Door het draait van de schroefverbinding (A) kunnen de volgende instellingen van de onderarmsteunen worden uitgevoerd:

- Afstand tot de gebruiker
- Kanteling
- Rotatie
- Verschuiven in de lengterichting

Voor het instellen van handgreep (B) draait u schroefverbinding (C) los. Voor de verschillende lengtes onderarmen kan nu handgreep (B) naar voren of naar achteren worden geschoven. Ook de hoek kan in de gewenste positie worden gebracht.



## 4. Toebehoren.

### 4.2 Armleuningen

De armleuningen kunnen in de hoogte worden veresteld. Voor het monteren van de armleuningen, steekt u ze verticaal in de sleuven (**A**), terwijl u knop (**B**) houdt ingedrukt. De armleuningen worden in de hoogte veresteld door knop (**B**) in te drukken en de armleuningen in de gewenste positie te schuiven. Vervolgens dient u een duidelijke klik te horen, pas dan zitten de armleuningen echt vast. De hoek wordt veresteld, door knop (**C**) in te drukken en de armleuningen in de gewenste positie te brengen. De armleuning moet daarna hoorbaar vastklikken!



### 4.3 Dynamiek

De **activity chair** kan met of zonder dynamische zittingkanteling en dynamische rug worden besteld. De dynamiek dient er voor om (ongecontroleerde) bewegingen van de gebruiker zachtjes op te vangen.



## 4. Toebehoren.

### 4.3.1 Dynamische rug

De dynamische rug wordt door een gasdrukveer die zich achter de rugleuning bevindt aangestuurd.

De gasdrukveer heeft drie functies:

#### 1. Gasdrukveer ontgrendelt

Door de witte greep (A) met de wijzers van de klok mee te draaien, maakt u een dynamische beweging van 10° mogelijk. Door op de witte schakelaar (B) te drukken kunt u het verstelbereik daarnaast nog uitbreiden van 20° tot (-)5°.

#### 2. Naar voren verstellen van de gasdrukveer

U draait de witte greep (A) met naar voren gekantelde rugleuning tegen de wijzers van de klok in. De witte schakelaar (B) maakt een verstelling van 10° tot (-)5° mogelijk.

#### 3. Kantelafstelling van de gasdrukveer

Druk, terwijl de gasdrukveer ontgrendeld is, de rugleuning in liggende positie. Draai greep (A) tegen de wijzers van de klok in. Door het bedienen van de witte schakelaar (B) kan de rughoek van 20° tot (-)5° worden veresteld. Beweeg de rugleuning bij het blokkeren van de gasdrukveer naar achteren of voren, zodat ze gemakkelijker in de gewenste positie glijdt! De ingestelde rughoek kunt u op het display (C) aflezen, de ingestelde zithoek op het display (D)!



## 4. Toebehoren.

### 4.3.2 Dynamische zittingkanteling

De dynamische zittingkanteling wordt door een gasdrukveer die zich onder de zitunit bevindt aangestuurd.

De gasdrukveer heeft drie functies:

#### 1. Dynamische gasdrukveer ontgrendelt

Door de witte greep (A) met de wijzers van de klok mee te draaien, maakt u een dynamische beweging van 10° mogelijk. Door op de witte schakelaar (B) te drukken kunt u het verstelbereik daarnaast nog uitbreiden van (-)15° tot 15°.

#### 2. Naar voren verstellen van de gasdrukveer

U draait de witte greep (A) met naar voren gekantelde rugleuning tegen de wijzers van de klok in. Druk op het veiligheidsslot (B) en de kantelhendel (C), hierdoor wordt verstellen van de zitting van (-)5° tot 15° mogelijk.

#### 3. Kantelafstelling van de gasdrukveer


Druk, terwijl de gasdrukveer ontgrendeld is, de zitting in liggende positie. Draai greep (A) tegen de wijzers van de klok in. Vervolgens kan de zitting van -15° tot 5° worden veresteld. Door het bedienen van schakelaar (B) kunt u de hoek van de zitting instellen van (-)5° tot 15°.



**Beweeg de rugleuning bij het blokkeren van de gasdrukveer naar achteren of voren, zodat ze gemakkelijker in de gewenste positie glijdt!**



**De ingestelde hoek van de zitting kunt u op het display (C) aflezen! De ingestelde rughoek op het display (D)!**

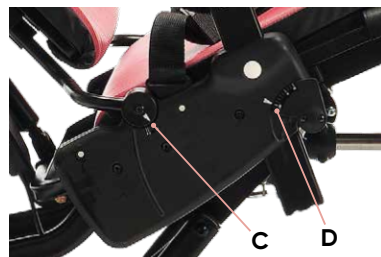


## 4. Toebehoren.

### 4.4 Looprollen met remmen

De looprollen kunnen in vijf hoogtes worden ingesteld. Voor het verstellen van de hoogte drukt u op knop (A) en laat deze op de gewenste hoogte hoorbaar in de uitsparingen klikken. U verwijdert de looprollen door knop (A) in te drukken en de looprollen uit de opname te trekken. Dit proces herhaalt u voor alle vier de looprollen.

Om de remfunctie van de wielen te activeren, trapt u op pedaal (B). Om de remfunctie te deactiveren, beweegt u pedaal (B) met de voet omhoog. Één van de zwenkwielen is voorzien van een richtingsvergrendeling (C). Deze activeert u door hem met de voet omlaag te drukken. Het is belangrijk dat de richtingsvergrendeling (C) tussen de individuele rollen wordt geplaatst zoals op de afbeelding hiernaast te zien is. Als u de richtingsvergrendeling (C) niet meer nodig hebt, trekt u deze gewoon weer omhoog.

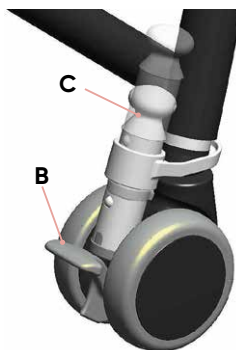

### 4.5 Hi/Lo-onderstel

Het Hi/Lo-onderstel is voor alle kleine maten en de middel- en grote maten van de **activity chair**. verkrijgbaar.

#### Instelling van de zithoogte middel-/grote maat

Trap pedaal (D) zo vaak in totdat de gewenste zithoogte is bereikt. Voor het laten zakken van de **activity chair**. bedient u de rode hendel (E) en het voetpedaal naar boven totdat de stoel is gezakt tot op de gewenste hoogte.



#### Instelling van de zithoogte bij kleine maten

Bedien de greep achter de rugleuning. Om de eet-/werkstoel hoger in te stellen, drukt u gelijktijdig beide witte schakelaars (F + G) in. Nu trekt u de hendel omhoog. Om de eet-/werkstoel lager in te stellen, drukt u gelijktijdig beide witte schakelaars (F + G) in en drukt u de hendel omlaag.



## 4. Toebehoren.

### 4.6 Voetenbank

De voetenbank kan in hoogte en hoek worden veresteld. Daarnaast kan de voetenbank worden opgeklapt of onder de zitting worden weggedraaid.

Voor het instellen van de kniehoek van de voetenbank, drukt u met de ene hand witte knop **(A)** op de gasdrukveer in en brengt u met de andere hand de voetenbank in de gewenste hoek. Na het instellen moet de voetenbank hoorbaar vastklikken!

Voor het verstellen van de hoogte van de voetenbank, drukt u gelijktijdig de witte knoppen **(B)** aan de buitenkanten in en brengt u de voetenbank in de gewenste positie. Na het instellen moet de voetenbank hoorbaar vastklikken!

Voor het instellen van de hoek van de voetenplaat drukt u op witte knop **(C)** in het midden van de hielrand en brengt u de voetenplaat in de gewenste positie. Deze instelling is eenvoudiger wanneer de opklapfunctie met grendel **(D)** aan de achterkant van de voetenplaat is vergrendeld.



## 4. Toebehoren.


### 4.7 Hoofdsteun

De hoofdsteun kan in hoogte, diepte en hoek worden ingesteld. Voor het instellen van de hoek of de diepte, draait u beide draaigrepen (**A + B**) los en brengt u de hoofdsteun in de gewenste positie. Om de hoogte in te stellen of om de hoofdsteun te verwijderen drukt u de witte knop (**C**) in en brengt u de hoofdsteun in de gewenste positie of verwijdert u deze. Na de instelling van de hoogte dient de hoofdsteun hoorbaar vast te klikken!



### 4.8 Romppelotten

De romppelotten (**D**) zijn in hoogte, breedte en hoek instelbaar. Ze kunnen met en zonder borstgordel worden gebruikt. Voor het bevestigen/instellen van de romppelotten (**D**) draait u de zwarte draaigreep (**E**) los en steekt u klem (**F**) in de uitsparing (**G**) achter de rugleuning. Met behulp van schuifbeugel (**H**) kunt u nu de gewenste breedte in het langsgat instellen. Voor het instellen van de hoogte, draait u draaigreep (**E**) los, schuift u de romppelotte in de rails (**I**) op de gewenste positie en draait u draaigreep (**E**) weer vast. Voor het instellen van de hoek, draait u draaigreep (**E**) los en brengt u de romppelotte in de gewenste hoek. Vervolgens draait u draaigreep (**E**) weer vast.

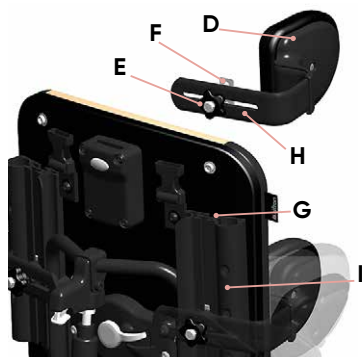

## 4. Toebehoren.

### 4.9 Borstgordel

Er zijn twee soorten borstgordels: eentje die wordt gebruikt in combinatie met de rompelotte en eentje die onafhankelijk van de pelotte kan worden gebruikt. Om borstgordel **(A)** in combinatie met de rompelotten te gebruiken, draait u stergreep **(B)** van de rompelotte los, plaatst u de lus van de borstgordel over de schuifbeugel van de rompelotte en draait u draaigreep **(B)** weer vast. Nu kunt u in het borstgebied van de gebruiker de borstgordel aanpassen en met behulp van de insteeksluiting sluiten en openen. Borstgordel **(C)** die zonder rompelotten gebruikt kan worden, wordt bevestigd door het draait van draaigreep **(B)** aan de achterzijde van de **activity chair**. en door vervolgens de lus van de gordel boven de perforatie aan te brengen. Draai draaigreep **(B)** weer vast. De borstgordel kan nu in het borstgebied van de gebruiker links en rechts worden aangepast en met behulp van de insteeksluiting worden gesloten en geopend.



### 4.10 Borst-schoudergordel


Er zijn twee soorten borst-schoudergordels, een smalle en een brede. Voor het aanbrengen van de borst-schoudergordel, steekt u de beide bovengste gordels aan de achterkant van de **activity chair**. in de kliksluitingen **(D + E)**. Vervolgens worden de beide onderste gordels aangebracht. Om de gordels vast te maken, druk u met een stift o.i.d. de kleine witte knop **(F)** in (zie **punt 3.5**) en voert de L-vormige metalen beugel **(G)** in de uitsparingen **(H)**. Nu kunnen de gordels in het buikgebied van de gebruiker worden aangepast en met behulp van de insteeksluiting worden gesloten en geopend.



## 4. Toebehoren.

### 4.11 Dijkeengordel

Voor het aanbrengen en instellen van de dijkengordel, verwijdert u het zitkussen (zie **punt 3.8**). Nu kunt u de beide uiteinden van de gordel in de H-vormige uitsparingen (**A**) schuiven. Trek de gordel strak, zodat het L-vormige metalen oog stevig op de zitting rust. Plaats vervolgens het zitkussen weer terug (zie **punt 3.8**). Wanneer de gebruiker in **de activity chair** zit, kunt u de dijkengordel aanpassen en sluiten met behulp van de insteeksluiting.

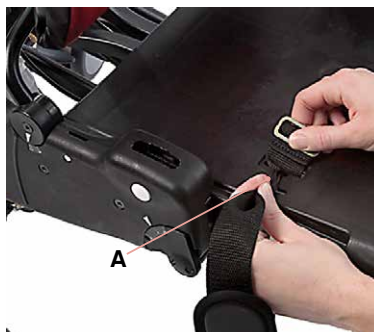

### 4.12 Zitbroek


Voor het bevestigen van de zitbroek, legt u deze met de bovenkant naar boven gericht op het zitvlak. Steek de L-vormige metalen clips aan de zijkant in de middelste uitsparing (**B**). Hiervoor drukt u de witte knop (**C**) onder de uitsparing diep in (zie hiervoor **punt 3.5**) en voer de metalen clips in totdat ze hoorbaar vastklikken. Nu kunt u de gebruiker op de zitbroek plaatsen en deze bij de benen aanpassen en sluiten met behulp van de insteeksluiting. Wanneer u de zitbroek wilt verwijderen, opent u de insteeksluiting, drukt de witte knop (**C**) met een stift o.i.d. diep in en trekt u de L-vormige metalen clips uit de uitsparing.



## 4. Toebehoren.

### 4.13 Dijbeensteunen

Dijbeensteunen (A) kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met armleuningen (B) en kunnen in de breedte worden versteld. Hiervoor schuift u de linker dijbeensteun van onder af over de linker armleuninghouder en de rechter dijbeensteun van onder af over de rechter armleuninghouder. Nu kunt u de armleuningen in de uitsparing steken (zie punt 4.2). Vervolgens bedient u de witte knop (C) aan beide zijkanten, om de dijbeensteunen in de breedte te verstellen. De dijbeensteunen moeten hoorbaar vastklikken.

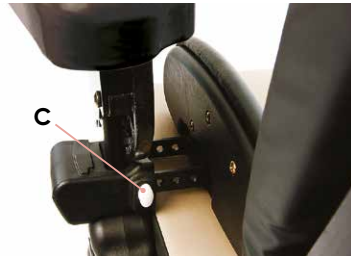

### 4.14 Abductiewig

Voordat u de abductiewig (D) kunt plaatsen, moeten eventuele steunkussens voor de knie worden gedemonteerd! (zie punt 4.16) Nu kunt u de abductiewig plaatsen, door de witte knop (E) te bedienen, de abductiewig (D) in de rail te voeren en in de gewenste positie te brengen. De abductiewig (D) moet na het instellen hoorbaar vastklikken. U kunt de abductiewig (D) demonteren, door het bedienen van de witte knop (E) en het vervolgens verwijderen van de wig uit de rails.



## 4. Toebehoren.


### 4.15 Knie-zijgeleider

De knie-zijgeleiders (A) bieden een comfortabele, zijdelingse begrenzing voor de gebruiker. Voor het aanbrengen van de knie-zijgeleiders (A), bedient u de witte knop (B) onder de zitunit. Nu kunt u de knie-zijgeleiders in de uitsparingen (C) schuiven. De knie-zijgeleiders moeten hoorbaar vastklikken, anders zitten ze niet voldoende vast!



### 4.16 Knie-steunkussens

De knie-steunkussens (D) kunnen in diepte en breedte worden versteld. Voor het monteren van de knie-steunkussens (D), drukt u de witte knop (E) in en steekt u de steekas (F) in de uitsparing (G). Voor het instellen van de diepte, bedient u ook de witte knop (E) en brengt u de knie-steunkussens in de gewenste positie. Ze moeten hoorbaar vastklikken. De breedte kan worden ingesteld door de witte knoppen (H) onder de positioneringsgordel te bedienen en de knie-steunkussens in de gewenste positie te brengen. Ze dienen hoorbaar vast te klikken, anders zitten ze niet voldoende vast! Vervolgens kunt u de gordels aanpassen en met een insteeksluiting vastzetten.

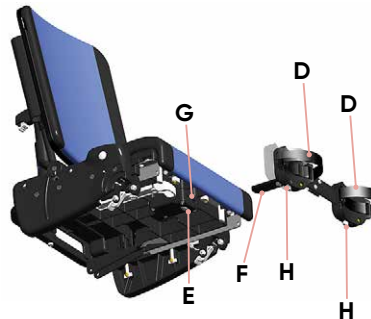


**De knie-steunkussens kunnen niet in combinatie met een abductiewig worden gebruikt!**



## 4. Toebehoren.


### 4.17 Enkelpositioneringshulp

De enkelpositioneringshulpen (A) kunnen uitsluitend in combinatie met een voetenbank (F) worden gebruikt! De enkelpositioneringshulpen (A) worden gemonteerd door de gordel door de T-groef (C) aan de achterzijde van de voetenbank (B) te steken. Trek de gordel nu vast en borg daarmee de aan de gordel bevestigde gespen (D). Voor een betere positionering, past u de gordels in het enkelgebied aan en sluit u de positioneringshulp door middel van de insteeksluiting.

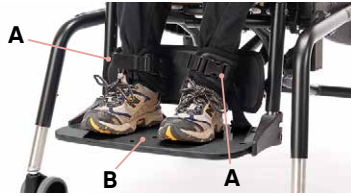

### 4.18 Sandalen en wiggen

De sandalen met voetriemen kunnen uitsluitend in combinatie met de voetenbank worden gebruikt. De wiggen zijn alleen in combinatie met de voetenbank en de sandalen met de voetriemen te gebruiken. Leg de sandalen in de gewenste positie op de voetenbank, zodat de ster-grepen (E) boven de boringen (F) liggen. Draai de stergrepen (E) nu vast. Om de wiggen op de sandalen te bevestigen, trekt u de witte hendel (G) naar voren. Nu kunt u de wiggen op de sandalen leggen en omlaag drukken, totdat ze hoorbaar vastklikken. Vervolgens worden de voetvlakken op de wiggen gedrukt en vastgemaakt, door de witte hendel (H) naar achteren te drukken.

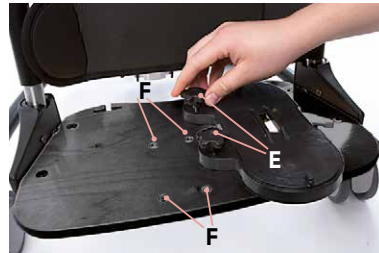


**De sandalen kunnen niet in combinatie met de enkelpositioneringshulpen worden gebruikt!**

## 4. Toebehoren.

### 4.19 LWS-ondersteuning en zitbeenranden

De LWS-ondersteuning biedt de gebruiker extra ondersteuning voor de onderrug. Voor het aanbrengen van de LWS-ondersteuning (A) en zitbeenranden (B), verwijdert u het kussen (zie **punt 3.8**) en brengt u de ondersteuning met behulp van de meegeleverde dubbelzijdige tape aan. De smalle LWS-ondersteuning (A) wordt ter hoogte van de onderrug geplakt. De bredere zitbeenrand (B) wordt voor op de zitting geplakt.

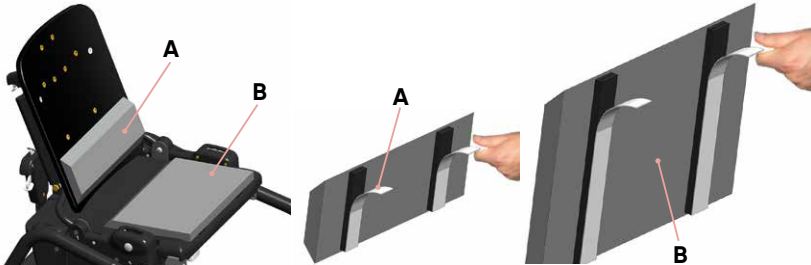

### 4.20 Rugverlenging

Als de rugleuning van de **activity chair** in de hoogste stand staat, ontstaat er een tussenruimte tussen de rugunit en het zitvlak. Om deze ruimte op te vullen wordt de rugverlenging gebruikt. Hiervoor clipt u de rugverlenging gewoon van achteren op de zwarte ronde knop (C) op de rugunit.



## 4. Toebehoren.


### 4.21 Werkblad

Het werkblad (A) kan uitsluitend in combinatie met de armleuningen worden gebruikt! Hij kan in de hoogte, diepte en hoek worden ingesteld. Voor het monteren van de het werkblad, stelt u de armleuningen (B) op dezelfde hoogte in, nu kunt u het werkblad plaatsen. Hiervoor trekt u de zwarte hendel (C) onder het werkblad (A) naar u toe en schuift u de het werkblad over de armleuningen (B). Voor het instellen van de diepte van het werkblad (A), bedient u de zwarte hendel (C) en klikt u de therapietafel (A) op de gewenste positie hoorbaar vast! De hoek en de hoogte moeten met behulp van de armleuningverstelling worden ingesteld (zie **punt 3.4**)



### 4.22 Handgreep

De handgreep kan uitsluitend in combinatie met het werkblad worden gebruikt! Hij kan rondom de rand van het werkblad worden aangebracht en kan daardoor in hoek en diepte worden versteld. Voor het aanbrengen van de handgreep, steekt u hem over de rand van de tafel en draait u greep (D) vast. Voor het veranderen van de hoek van de handgreep, draait u greep (D) lichtjes los, zet de handgreep in de gewenste positie en draait greep (D) weer vast.

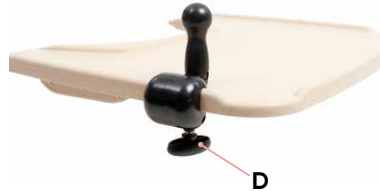

## 4. Toebehoren.

### 4.23 Schuifgrepen

Wij adviseren het gebruik van schuifgrepen (A) bij elke **activity chair**, die voorzien is van dubbele looprollen! Voor het monteren van de schuifgrepen, steekt u greep (B) in de lange buis (C). Voor een goede bevestiging moet knop (D) in een van de uitsparingen worden geklikt. U kunt de schuifgreep in de hoogte verstellen. Hiervoor drukt u op knop (D) en brengt u de greep in de gewenste positie. De knop moet hoorbaar in de uitsparing vastklikken!



### 4.24 Voetenbank-verhoging

De voetenbank-verhoging (E) is alleen geschikt voor de middel- en grote maten van de **activity chair**. Onderdelen zoals de sandalen, de wiggen of de enkelpositioneringshulpen kunnen hierop worden gemonteerd net zoals op de voetenbank (zie **punten 4.17** en **4.18**). De voetenbank-verhoging (E) wordt op voetenbank (F) gemonteerd en zorgt voor een verhoging van 10 cm. U plaatst hiervoor de verhoging op de voetenbank, met de stergreep (G) parallel aan de boringen in de voetenbank. Draai vervolgens de stergreep (G) stevig aan.



## 4. Toebehoren.

### 4.25 Minikit

De Minikit zorgt ervoor dat ook de kleinste kinderen al gebruik kunnen maken van de **activity chair**. (van 8 maanden tot twee jaar). Hij bestaat uit een treeplank **(A)** voor de voetenbank, voor het vergemakkelijken van in- en uitstappen, een verkleiningsmodule voor de rug **(B)**, die in de hoogte en breedte kan worden aangepast, en een leuninginzet **(C)** die de zitdiepte met 3 cm naar voren aanpast. Voor het aanbrengen en instellen van de verkleiningsmodule voor de rug **(B)**, dient u de montage van de romppelotten te raadplegen (zie **punt 4.8**), de verkleiningsmodule wordt op dezelfde manier gemonteerd en ingesteld. De leuninginzet **(C)** wordt aangebracht, door het rugkussen te verwijderen (zie **punt 3.8**) en de leuninginzet in de uitsparing te plaatsen waarna het kussen terug wordt geplaatst.



## 5. Reinigen en inspectie.


### 5.1 Reinigen en desinfecteren

#### 5.1.1 Reiniging

Reinig alle frame-elementen regelmatig met een spons of vochtige doek, met name waterdruppels moeten worden verwijderd. Bij sterke verontreiniging moet de reiniging met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de gereinigde plaatsen goed droog te maken.

Alle stoffen die niet kunnen worden verwijderd, kunnen met een vochtige doek worden afgeveegd. Let bij alle verwijderbare stoffen op de ingenaaide onderhoudsetiketten (zoals **A+B**) op het betreffende element.

Neem onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en hygiëne in acht. Die vindt u op [www.schuchmann.de/mediatheek](http://www.schuchmann.de/mediatheek).

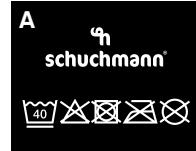

#### 5.1.2 Desinfectie

Voor het desinfecteren van oppervlakken van de metalen en kunststof onderdelen kunnen verschillende producten worden gebruikt.

Vloeibare desinfectiemiddelen zijn verkrijgbaar als kant-en-klare-oplossing, die op een zachte doek moet worden gespoten en vervolgens regelmatig moet worden aangebracht. Als alternatief kan er ook gebruik worden gemaakt van doekjes die in een desinfectiemiddel zijn gedompeld en waarmee vervolgens de producten grondig worden afgeveegd. In beide gevallen moet erop worden gelet dat het product volledig nat wordt. Desinfectie in volautomatische desinfectie-installaties is ook mogelijk en wordt zelfs aanbevolen.

De inwerktijden kunnen variëren en kunnen uit de documentatie van de fabrikant worden gehaald.

### 5.2 Inspectie

Voer een dagelijkse zichtcontrole uit en controleer het product regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende onderdelen en storingen. Wend u zich bij een defect of storing rechtstreeks tot de dealer die u heeft geleverd (zie **punt 8.5**).

### 5.3 Onderhoud

Omwille van de veiligheid van de gebruiker en voor het behoud van de productaansprakelijkheid dient er minimaal eenmaal per jaar onderhoud te worden uitgevoerd door de dealer (zie **punt 8.5**). Het uitgevoerde onderhoud dient te worden vastgelegd in het onderhoudsschema (zie **punt 5.3.2**).



## 5. Reinigen en inspectie.

### 5.3.1 Aandachtspunten onderhoud

- Basisreiniging conform specificaties van de fabrikant
- Evt. desinfectie conform specificaties van de fabrikant
- Beschadigingen aan frame, aanbouwdelen en accessoires (scheuren, breuken, corrosie, verbogen of ontbrekende onderdelen)
- Sterkte van de verbindingen (losse schroeven vastdraaien, ontbrekende schroeven vervangen)
- Werking van de insteелеlementen (schroeven, ontgrendelhendel)
- Werking van de overige insteелеlementen (glijlagers, rug, hoofdsteen, pelotten, armleningen, voetensteunen, tafel en geleidingen bij de benen)
- Werking van de gasdrukveren (evt. aanpassing van de Bowden-kabel)
- Werking van de zwenkwielen (concentriciteit, lichte loop, remmen)
- Controle van de gordels op beschadigingen (klemmen, sluitingen, naden)
- Controle van de kussens en hoezen op beschadigingen
- Leesbaarheid van het typeplaatje
- Afsluitende volledige controle van de werking van het hulpmiddel
- Controle van de correcte bevestiging van alle aanbouwdelen en de bijbehorende accessoires

### 5.3.2 Onderhoudsplan

Aandachtspunten voor het onderhoud van de fabrikant (zie **punt 5.3.1**) werden uitgevoerd:

Datum	Bedrijf	Naam	Handtekening



**Vastgestelde gebreken of beschadigingen moeten voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt zijn verholpen door de dealer of de fabrikant.**

## 5. Reinigen en inspectie.

### 5.4 Reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen van de firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt en uw recht op garantie verliest.

Voor het bestellen van reserveonderdelen kunt u zich, met opgave van het serienummer van het product, tot uw leverancier wenden (zie **punt 8.5**). De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen door geschoold personeel worden gemonteerd.

### 5.5 Gebruiksduur en hergebruik

De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8" jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode nog steeds worden gebruikt, wanneer het zich in een veilige staat bevindt. De te verwachten gebruiksduur is niet van toepassing voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals zwenkwielen, gasdrukveren,... . Het onderhoud en de beoordeling van de staat, en in voorkomende gevallen het hergebruik, is voor de verantwoordelijkheid van de dealer.

Het product is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u het product doorgeeft de onder **punt 5.1** genoemde reinigings- en desinfectie-instructies uit. Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven. Voor hergebruik hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt aangeraden het product in te stellen op zijn meest compacte maten, om ruimte te besparen.



**Wanneer er zich tijdens de gebruikstijd bij beoogd gebruik van het product een ernstig incident voordoet, moet dit onmiddellijk aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties worden gemeld.**



## 6. Technische gegevens.

### Afmetingen

		Mt. 0	Mt. 1	Mt. 2
Zitdiepte		20-30 cm	28-41 cm	38-51 cm
Zitbreedte		30 cm	36 cm	43 cm
Zitbreedte (met heupelotten)		18-23 cm	22-29 cm	28-36 cm
Borstbreedte		14-29 cm	17-30 cm	24-36 cm
Rughoogte		32-39 cm	39-48 cm	48-61 cm
Hoogte hoofdsteun - zitting		37-53 cm	44-62 cm	50-75 cm
Hoogte armleuning - zitting		13-19 cm	18-27 cm	18-27 cm
Onderbeenlengte		23-30 cm	30-41 cm	38-51 cm
Zithoogte boven de vloer	met korte/met lange poten	24-32 cm/ 47-55 cm	32-42 cm/ 48-58 cm	42-52 cm/ 51-61 cm
	met korte/met lange poten en dubbele looprollen	34-42 cm/ 47-55 cm	41-51 cm/ 48-58 cm	42-52 cm/ 51-61 cm
Frame- breedte	met korte/met lange poten	53/58 cm	59/62 cm	66/66 cm
	met korte/met lange poten en dubbele looprollen	57/60 cm	62/65 cm	71/71 cm
Zithoek		(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	(-)15° - 15°
Rughoek		(-)5° - 20°	(-)5° - 20°	(-)5° - 20°
Max. belasting		34 kg	68 kg	102 kg

## 7. Garantie.

Voor alle producten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Deze gaat in bij de aflevering of overdracht van de producten. Wanneer binnen deze periode aan het door ons geleverde product aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt zullen wij bij vrachtvrije terugzending naar ons, de gereclameerde schade bekijken en eventueel kosteloos en naar ons goeddunken repareren of nieuw leveren.

# 8. Identifizierung.

## 8.1 EU-conformitätsverklärung



**schuchmann®**

### EU Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity



Firma / Company      Schuchmann GmbH & Co. KG  
Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany  
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1  
*declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices*

**„activity chair.“** Dynamischer Therapiestuhl / *dynamic therapy chair*

Art.-Nr. / Item-No.: 72 00 000, 72 00 100, 72 01 000, 72 01 100, 72 02 000, 72 02 100

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004000720XXXXBB

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht:  
*is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards:*

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017  
*Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017*

DIN EN 12182:2012      Technische Hilfen für behinderte Menschen  
*Technical aids for disabled persons*

DIN EN ISO 14971:2013      Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte  
*Medical devices – Application of risk management to medical devices*

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und  
ist gültig bis zum 31.12.2023.

*This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers  
and is valid until 31.12.2023.*

Datum / Date:            01.04.2020

Unterschrift / Sign: 

Name / Name:            Torsten Schuchmann


Funktion / Function:    Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / *Safety officer for medical devices*



## 8. Identificatie.

### 8.2 Serienummer/Productiedatum

Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt (**A**).

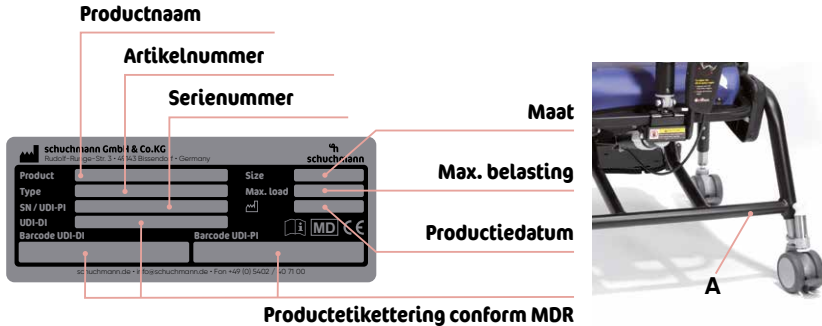

### 8.3 Productversie

De eet-/werkstoel **activity chair**. is verkrijgbaar in drie maten en zes varianten kan door veelvuldig toebehoren uitgebreid worden (zie **punt 4**).

### 8.4 Uitgave van het document

Gebruiksaanwijzing **activity chair**. – Wijzigingsstand B, uitgave 04–2020

### 8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer

Dit product werd geproduceerd door:



#### Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Duitsland  
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109  
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dit product werd door de volgende dealer geleverd:



Korte Stukken 7 · 5371 MN Ravenstein · Netherlands  
Tel. +31 (0)486/45 33 44  
info@atlaskidtech.nl · www.atlaskidtech.nl





**schuchmann.de**