

bello 2.



Gebruiksaanwijzing.

bello 2. De moderne, integratieve eet-/werkstoel.



Hartelijk dank.



Geachte cliënte, geachte cliënt,

Wij willen u hierbij hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de aanschaf van ons product. We vragen u om de gebruiksaanwijzing vóór de eerste ingebruikname van het product aandachtig te lezen en in acht te nemen. Houdt u er rekening mee dat instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing door de uitvoering van uw product kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

Belangrijke informatie!

Zorg ervoor, dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw **Schuchmann**-team



1. Voorbereiding	05
1.1 Uitlevering	05
1.2 Veiligheidsmaatregelen vóór het gebruik	05
1.3 Veilig verwijderen.....	05
1.3.1 Verpakking.....	05
1.3.2 Product.....	05
1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing.....	05
2. Productbeschrijving	06
2.1 Materiaalinformatie	06
2.2 Handling/transport.....	06
2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften.....	06
2.3.1 Indicaties	06
2.3.2 Contra-indicaties.....	06
2.4 Oneigenlijk gebruik/Waarschuwingen	07
2.5 Uitrusting basismodel	07
2.6 Lijst met toebehoren	08
2.7 Productoverzicht.....	08
3. Instellingen	09
3.1 Zithoogte.....	09
3.2 Zithoek	10
3.3 Zitdiepte.....	10
3.4 Rughoek.....	10
3.5 Rughoogte.....	11
3.6 Armleuningen	11
3.7 Voetenbank.....	12
3.8 Voetensteunen.....	13
3.8.1 Positioneren van de voetensteunen.....	14
3.9 Voetensteunen met voetenschalen	15
4. Toebehoren	16
4.1 Hoofdsteun.....	16
4.2 Ombouwset naar combi-onderstel.....	16
4.3 Afneembare rug.....	17
4.4 Romppelotten.....	17
4.5 Wegklapbare romppelotten	17
4.6 Dijbeensteunen	18
4.7 Abductie instelling	18
4.8 Instelbare bekkengeleider.....	19
4.9 Centrale beremming	19
4.10 Kantelbeveiliging.....	19
4.11 Werkblad	19
4.12 Knie-abductiewig	20
4.13 Wielstandverlenging.....	20



5. Reinigen en inspectie.	20
5.1 Reinigen en desinfecteren	20
5.1.1 Reiniging	20
5.1.2 Desinfectie	21
5.2 Inspectie	21
5.3 Onderhoud	21
5.3.1 Aandachtspunten onderhoud	21
5.3.2 Onderhoudsplan	22
5.4 Reserveonderdelen	23
5.5 Gebruiksduur en hergebruik	23
6. Technische gegevens.	24
7. Garantie.	25
8. Identificatie.	26
8.1 EU-conformiteitsverklaring	26
8.2 Serienummer/Productiedatum	27
8.3 Productversie	27
8.4 Uitgave van het document	27
8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende leverancier	27

1. Voorbereiding.

1.1 Uitlevering

Gelieve het product bij ontvangst op volledigheid en gebreken te controleren en let op eventuele transportschade. Controleer het product in aanwezigheid van de bezorger. Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Stuur een schriftelijke reclamatie naar de verantwoordelijke dealer.

1.2 Veiligheidsmaatregelen vóór het gebruik

Het correcte gebruik van het product vraagt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de gebruiker of de begeleidende persoon. We vragen u om de gebruiksaanwijzing vóór de eerste ingebruikname van het product aandachtig te lezen en in acht te nemen. De mogelijkheid bestaat, dat de productonderdelen die met de huid in aanraking kunnen komen, warm kunnen worden door zonnestralen. Bedek deze plaatsen of bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.

1.3 Veilig verwijderen

Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuverontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de verwijderingsinstructies in de **punten 1.3.1** en **1.3.2** in acht te nemen.

1.3.1 Verpakking

De verpakking van het product dient voor een eventueel toekomstig, noodzakelijk transport te worden bewaard. Wanneer u het product voor reparatie of in geval van een garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien mogelijk, de originele doos gebruiken, zodat het product optimaal verpakt is. Breng in andere gevallen het verpakkingsmateriaal per soort naar de recycling.



Laat het verpakkingsmateriaal niet zonder toezicht, omdat het mogelijk een bron van gevaar vormt.

1.3.2 Product

Voer na verstrijken van de levenscyclus van het product de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling (zie materiaal informatie onder **punt 2.1**).

1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat deze in geval van een mogelijk hergebruik bij het product blijft. Bij verlies van de gebruiksaanwijzing kan te allen tijde een actuele versie worden gedownload onder www.schuchmann.de.



2. Productbeschrijving.

2.1 Materiaalinformatie

Het basisframe alsmede de afzonderlijke elementen zijn staal en aluminium vervaardigd, corrosievrij en gepoedercoat. De bekleding bestaat voor 100% uit polyester en is brandvertragend (volgens DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handling/transport

De eet-/werkstoel is niet bedoeld om te worden gedragen, omdat hij uitgerust is met zwenkwielen. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen worden, dan dient u zich ervan te vergewissen dat alle bewegende delen zijn vastgezet. Ga vervolgens naast de eet-/werkstoel staan, pak deze voor en achter onder het zitgedeelte vast en draag hem naar de gewenste plaats. Voor het transporteren van de eet-/werkstoel, stelt u alle instellingen op de meest compacte maat in (voetenbank opklappen, zithoogte in de laagste stand, etc.)



Zet alle beweegbare onderdelen voor het dragen vast!



De gebruiker mag zich tijdens het transport niet in de eet-/werkstoel bevinden!

2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften

De eet-/werkstoel **bello 2**. is een medisch product voor risicoklasse 1 en is ontworpen gebruik thuis, op de kleuterschool en op school. Hij is te gebruiken voor alle leeftijdscategorieën van kleine kinderen tot jongeren. Individueel instelbare zitmaten en ondersteunende pelotten zorgen voor een stabiele en rechte zithouding. Een ander of daaraan voorbijgaand gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd.

2.3.1 Indicaties

De eet-/werkstoel **bello 2**. is ontworpen voor kinderen en jongeren, die niet vrij kunnen zitten of staan, maar waarvan de beperkte romphouding het zitten in een zitschaal niet permanent vereist. Het gaat hier onder meer om een stoornis van het zitten bij functionele en/of structurele beschadigingen van de romp of van de romp- en mogelijk nekspieren (bijv. door neurologische/neuromusculaire aandoeningen, misvormingen van de wervelkolom) met een verkeerde houding.

2.3.2 Contra-indicaties

Over het algemeen dient de indicatie van medisch-orthopedische zijde te worden begeleid. Daarom dient in dit verband voor de zorg helder te zijn of er contra-indicaties bestaan ten aanzien van de gebruiker. Over het algemeen is elke vorm van pijn een contra-indicatie.

2. Productbeschrijving.



2.4 Oneigenlijk gebruik/Waarschuwingen

- Let op, dat de eet-/werkstoel door slechts één gebruiker wordt gebruikt.
- Gebruik de eet-/werkstoel alleen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Gebruik de eet-/werkstoel niet voor transport van personen.
- Om de eet-/werkstoel tijdens het transport veilig op te kunnen tillen, gaat u zijdelings naast de eet-/werkstoel staan en pakt u deze voor en achter bij het zitvlak vast. Daarbij moeten alle beweegbare delen zijn vastgezet.
- Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in de eet-/werkstoel zitten.
- Het correcte gebruik van de eet-/werkstoel vergt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de begeleidende persoon.
- De maximum belasting (zie **punt 6**) mag niet overschreden worden.
- Gebruik de eet-/werkstoel niet met defecte, versleten of ontbrekende delen.
- Omwille van de brandveiligheid mag de eet-/werkstoel niet in de omgeving van een open vuur of een andere sterke warmtebron zoals elektrische of gasverwarmingen worden geplaatst.
- Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen van firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt.
- Gebruik de eet-/werkstoel alleen, als alle componenten correct zijn aangebracht en ingesteld.
- Er dient op gelet te worden dat er zich bij alle in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.
- Gebruikers die problemen hebben met zien of lezen moeten zich de gebruiksaanwijzing laten voorlezen om veilig met de eet-/werkstoel om te kunnen gaan.

2.5 Uitrusting basismodel

- incl. armleuningen, voetenbank, duwgreep, standaard zitkussen met hoes
- Zithoogte instelbaar met gasdrukveerondersteuning (1200N, 800N bij maat 0)
- 4 looprollen (75 mm), waarvan 2 met blokkeerrem
- Instelmogelijkheden: zithoek (per gasdrukveer 500N), rughoek, zitdiepte en zitbreedte, in hoek, hoogte en breedte verstelbare armleuningen, in hoogte regelbare rugleuning, opklapbare voetenbank, verstelbare kniehoek, voethoek en hoogte



2. Productbeschrijving.

2.6 Lijst met toebehoren

- Hoofdsteun
- Afneembare rug
- Rompelotten (ook wegklapbaar)
- Dijbeensteunen
- Instelbare bekkengeleider
- Werkblad
- Knie-abductiewig
- Ombouwset naar combi-onderstel
- Centrale beremming
- Hydraulische hoogteverstelling

2.7 Productoverzicht

Onderstaande afbeelding toont u de benaming van de belangrijkste componenten, evenals de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruiksaanwijzing tegenkomt.





3. Instellingen.

Instellingen en verstellingen van het product mogen alleen worden uitgevoerd door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur medische producten. Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle soorten in- en afstellingen geen ledematen van toepasser of gebruiker in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.

3.1 Zithoogte

De zithoogte wordt met behulp van een gasdrukveer geregeld. Om de zithoogte naar boven te verstellen, wordt het voetpedaal (A) op het basisframe bediend. Door licht te drukken glijdt de zitunit naar boven. Men laat de zitunit zakken door boven op de zitting te drukken onder gelijktijdige bediening van het voetpedaal. De gasdrukveer dient slechts als ondersteuning van de hoogteverstelling. Het voetpedaal kan met de trekspanstift (B) - die u aan de binnenkant van het voetpedaal vindt - tegen ongewilde bediening worden geborgd. Verdraai hiervoor de trekspanstift totdat hij vastklikt. Eventueel kunt u door licht bewegen van het voetpedaal het vastklikken ondersteunen. De vergrendeling wordt ontgrendeld door de trekspanstift eruit te trekken en vervolgens een kwartslag te draaien. Als alternatief kan de zithoogte met behulp van de hydraulische hoogteverstelling worden ingesteld. Om de

eet-/werkstoel naar omhoog te brengen, trapt u zo vaak op pedaal (C), tot de stoel zich op de gewenste hoogte bevindt. Om de eet-/werkstoel te laten zakken, plaatst u een voet onder pedaal (C) en drukt dit naar boven.

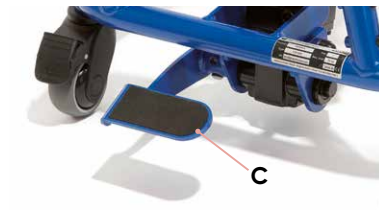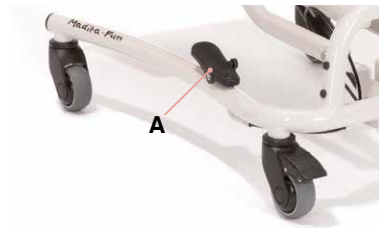

Let erop, dat er gedurende het instellen/verstellen van de zithoogte geen lichaamsdelen (voeten) in de buurt van het instel-/verstelmechanisme (tussen vloer en voetensteun van de eet-/werkstoel) terechtkomen, om mogelijk letsel te voorkomen



3. Instellingen.


Er is ook elektrische hoogteverstelling mogelijk. Deze wordt met de meegeleverde afstandsbediening (A) bediend. Druk de pijltoets naar beneden om de zithoogte naar beneden toe in te stellen en naar boven om de zithoogte naar boven toe in te stellen.



Bij problemen met de regelunit kunt u contact opnemen met een dealer, zodat de unit, indien nodig, naar de fabriek kan worden teruggestuurd. Zodra de behuizing wordt geopend, wordt ook de Linak-sticker (B) beschadigd, waarna de garantie van 2 jaar automatisch vervalt.

3.2 Zithoek

De hendel voor de zithoekverstelling is van een kinderbeveiliging voorzien. Om de hoek van de zitunit te verstellen, wordt handgreep (C) achteronder de zitschaalopname bediend, door deze horizontaal in elkaar te schuiven totdat hij vastklikt. De zitunit kan nu in de actieve of passieve stand worden ingesteld. Optioneel kan steeknop (D) voor de zithoekverstelling ook op de duwbeugel/-greep worden gemonteerd. De zithoekverstelling kunt u eenvoudig met steeknop (D) bedienen.

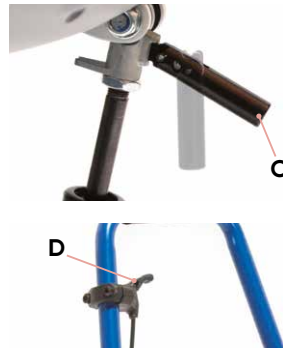

3.3 Zitdiepte

Voor het instellen van de zitdiepte draait u de twee vleugelmoeren (E) onder de zitunit los. Daarna kan de zitting traploos naar voren en achteren worden verschoven.



Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!

3.4 Rughoek

De rughoek kan na het losdraaien van klemhendel (F) op de rechterkant van de zitunit worden geregeld.



Let er op, dat bij het instellen van de rughoek geen lichaamsdelen binnen het bereik van het instel- / regelmechanisme terechtkomen, om mogelijk letsel te voorkomen.

3. Instellingen.

3.5 Rughoogte

Draai cilinderkopschroef (A) met inbussleutel (M8) aan de achterkant los en breng de rug op de gewenste hoogte.




3.6 Armleuningen

De armleuningen zijn in de hoek, in de lengte en in de breedte verstelbaar. De hoekverstelling kan plaatsvinden na het losdraaien van stergreep (B). Door het losdraaien van stergreep (C) kan de hoogte worden ingesteld.



De breedteverstelling kan plaatsvinden na het losdraaien van beide draadstiften (D), die zich op de onderzijde van de zitunit bevinden.

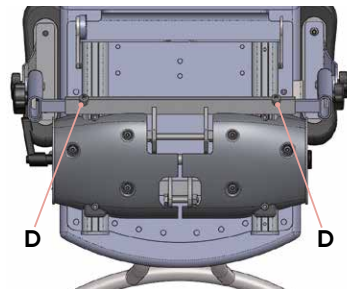


Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!

3. Instellingen.

3.7 Voetensteun

Het basismodel van eet-/werkstoel **bello 2**, beschikt reeds over een voetensteun **(A)**. Deze beschikt over een antislip oppervlak **(B)** en 8 sleuven **(C)** voor de bevestiging van gordels zoals enkelhuggers of wreefbanjes. Voor het instellen van de kniehoek draait u knevel **(D)** onder het zitvlak los, brengt de voetensteunen in de gewenste positie en draait knevel **(D)** weer vast. De voetensteun kan worden opgeklapt om bijvoorbeeld het instappen te vergemakkelijken **(E)**. Voor een traploze hoogte-instelling draait u de vier draadstiften **(F)** los, brengt de voetensteun in positie en draait de draadstiften **(F)** weer vast. Voor een optimale positionering van de voeten kan ook de enkelhoek worden ingesteld. Klap hiervoor eerst de voetenbank naar boven en draai vervolgens de inbusschroeven **(G)** in of uit. Borg de moeren **(H)** na iedere enkelhoekverstelling.

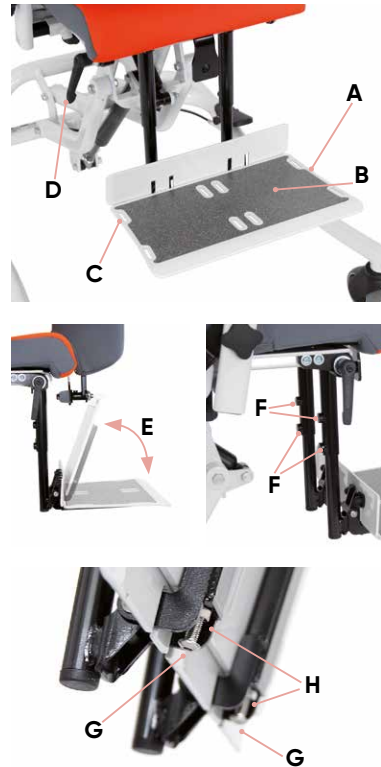

Borg de moeren (H) na iedere enkelhoekverstelling!




Draai na iedere instelling de knevels en draadstiften weer vast!

3. Instellingen.

3.8 Voetensteunen

bello 2. kan optioneel ook met voetensteunen (A) worden uitgevoerd. Die beschikken over een antislip oppervlak (B) en elk 4 sleuven (C) voor de bevestiging van gordels zoals enkelhuggers of wreefbanjes. Voor het instellen van de kniehoek draait u knevel (D) onder het zitvlak los, brengt de voetenbank in de gewenste positie en draait knevel (D) weer vast. Om bijvoorbeeld het instappen te vergemakkelijken kunnen de voetensteunen opgeklapt worden (E). Voor een traploze hoogteregeling draait u de beide draadstiften (F) van elke voetensteun los, brengt de voetensteun in positie en draait de draadstiften (F) weer vast.

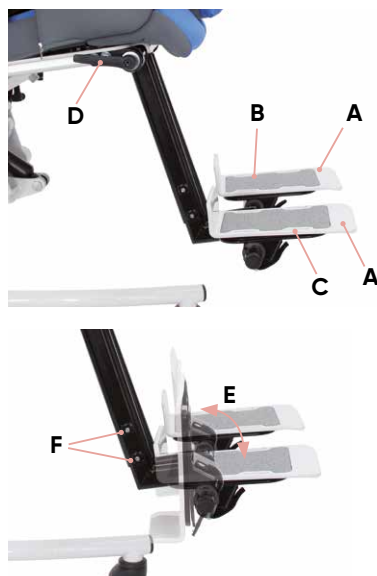

Draai na iedere instelling de knevels en draadstiften weer vast!

3. Instellingen.

3.8.1 Positioneren van de voetensteunen

Voor een optimale positionering van de voeten kunnen de voetensteunen onafhankelijk van elkaar in de breedte, in de hoek en in de diepte worden afgesteld. Voor het instellen van de breedte (C) draait u de lenskopschroeven (D) onder de voetensteunen los, brengt de voetensteunen in de gewenste positie en draait de lenskopschroeven (D) weer vast.

Voethoek


De voethoek (A) van de betreffende voetensteun kan worden versteld van (-)15° tot 5°. Draai hiervoor de draadstiften (B) onder de voetensteunen in of uit en stel daarmee de gewenste voethoek in.

Hoek/diepte

Voor het instellen van de hoek en de diepte (E) draait u de lenskopschroeven (F) onder de voetensteunen los, brengt de voetensteunen in de gewenste positie en draait de lenskopschroeven (F) weer vast. Daarnaast kan op deze manier ook een aanvullende breedteverstelling worden gedaan.

Beveiliging tegen omhoogklappen

De voetensteunen kunnen tegen ongewenst omhoogklappen worden beveiligd. Maak hiertoe de klittenbandsluiting (G) onder de voetensteun los, breng de voetensteun in de gewenste positie en sluit de klittenbandsluiting (G) weer.

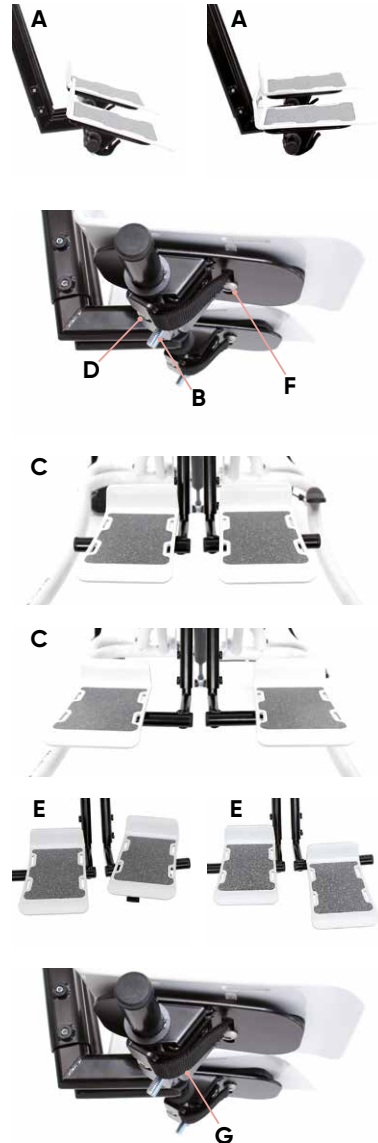


Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!

3. Instellingen.

3.9 Voetensteunen met voetschalen

De voetensteunen kunnen optioneel ook met voetschalen (A) worden uitgerust. Ook hier kan, net als bij de normale uitvoering, de kniehoek worden ingesteld, de voetschalen opgeklapt en de hoogte worden ingesteld (zie **punt 3.8**). Voor een optimale positionering van de voeten kunnen de voetensteunen met voetschalen onafhankelijk van elkaar in de breedte, in de hoek en in de diepte worden afgesteld (zie **punt 3.8.1**).

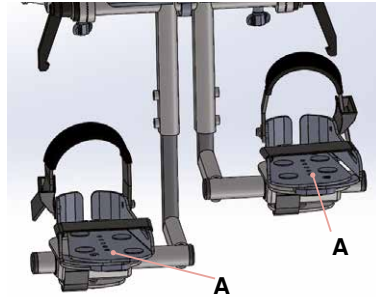

Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!

3.10 Looprollen

De eet-/werkstoel dient in principe door afremmen van de 2 achterste looprollen geblokkeerd te worden, om ongewild weggrollen te voorkomen. Druk daarvoor met de teen de remmen (B) naar beneden.



De rem dient alleen ter voorkoming van ongewild weggrollen op effen vlakken!

4. Toebehoren.

4.1 Hoofdsteun

De hoofdsteun is in hoogte, diepte en hoek instelbaar. Draai daarvoor beide cilinderkopschroeven met een inbus-leutel (**A**) los en breng de hoofdsteun in de gewenste positie.



4.2 Ombouwset naar combi-onderstel

Bij het ombouwen van **bello 2.** naar combi-onderstel worden de kunststof zwenkwielen vervangen door 6-inch zwenkwielen met luchtbanden met stuurvorken en 12 ½-inch trommelrem-wielen met luchtbanden. De trommelrem werkt onafhankelijk van de luchtdruk. Ze is in de wielnaaf geïntegreerd en daardoor niet toegankelijk. Ze biedt de begeleidende persoon de mogelijkheid, om tijdens het duwen mee te remmen (met name bij het bergafwaarts gaan) en het onderstel te blokkeren. Dit gebeurt met behulp van de beide remhendels (**B**) die op de duwgreep zijn gemonteerd. Het instellen van de trommelremmen gebeurt door het in- of uitdraaien van de stelschroeven. Die bevinden zich onderaan de remkabels in de remklauw. Dit dient u bij twijfel uit te laten voeren door uw dealer.



Handling wielen bij combi-onderstel

In principe geldt:

Hoge bandenspanning: minder rolweerstand/minder veercomfort

Lage bandenspanning: meer rolweerstand/meer veercomfort

4. Toebehoren.

4.3 Afneembare rug

De afneembare rug kan aan de achterkant van de eet-/werkstoel worden bediend. Draai daarvoor draaigreep (A) los, druk de vergrendelingshendel (B) samen en verwijder vervolgens de rug.



De functie van de afneembare rug kan in het therapieprogramma worden geïntegreerd en ook kortstondig worden gebruikt, omdat de rug samen met de hoofdsteun snel teruggeplaatst kan worden en de gebruiker bij vermoeidheid steun biedt.



Draai na iedere instelling alle verstellingen weer vast!



4.4 Romppelotten

De romppelotten kunnen afzonderlijk in hoogte en breedte worden afgesteld. Draai daarvoor beide lenskopschroeven met inbusleutel (C) los en breng de romppelotten in de gewenste positie.



4.5 Wegklapbare romppelotten

De wegklapbare romppelotten kunnen om gemakkelijk plaats te kunnen nemen naar opzij worden weggeklapt. Druk daarvoor aan de zijkant van de romppelotten op de rode drukknop (D) boven het scharnier en draai de romppelotte naar opzij weg.





Let er bij het terugklappen op, dat de romppelotte vastklikt!



4. Toebehoren.

4.6 Dijbeensteunen



De kussens van de dijbeensteunen zijn afzonderlijk in te stellen in breedte en diepte. Om de breedte in te stellen draait u de moeren (A) onder de zitting los en brengt u het kussen van de dijbeensteun in de gewenste positie. De diepte-instelling is bij elke dijbeensteun mogelijk, behalve bij de standaardversie voor maat 0 met instelbare bekkengeleider. Voor het instellen van de diepte opent u de ritssluiting (B), draait de 3 lenskopschroeven (C) met inbusleutel los en brengt de bekleding in de gewenste positie.

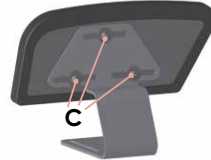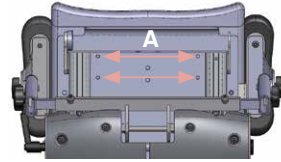

Draai na iedere instelling de verstellingen weer vast!

4.7 Abductie instelling




Met de abductie instelling is een medisch vereiste abductie van de dijen en compensatie van het zitdiepteverval mogelijk. Voor het instellen van de beengeleider draait u de moeren (D) onder de zitting los en brengt de beengeleiders in de gewenste positie. U kunt de abductiehoek (1), de dijbreedte (2) en de beenlengtecompensatie of het zitdiepteverval (3) met behulp van de slobgaten eenvoudig instellen, terwijl de gebruiker in de eet-/werkstoel zit.

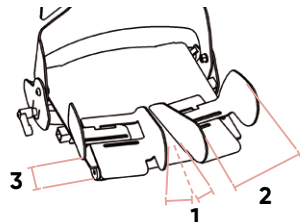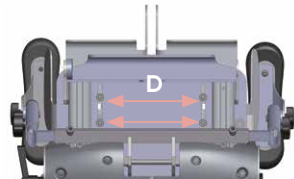

4. Toebehoren.

4.8 Instelbare bekkengeleider

De instelbare bekkengeleider kan in de breedte worden ingesteld, biedt de gebruiker veel veiligheid en positioneert het bekken. Draai eerst de cilinderkopschroef op de achterkant van de eet-/werkstoel aan de onderkant van de cover (A) los. Druk het kussen daarna het kussen voor licht naar beneden en draai inbusschroef (B) los. Zet nu de gebruiker in de stoel en breng de instelbare bekkengeleider in de gewenste positie. Draai eerst de cilinderkopschroef (A) weer vast en haal dan de gebruiker pas uit de stoel. Nu hoeft u nog maar de inbusschroef (B) weer vast te schroeven en dan kunt u de gebruiker weer terug in de stoel zetten.

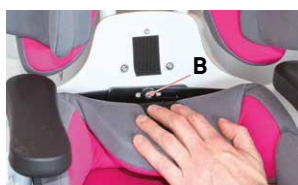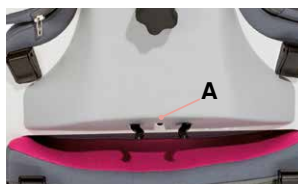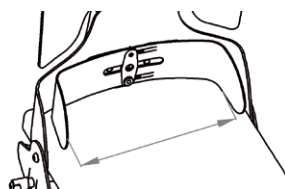

Draai na iedere instelling de verstellingen weer vast!

4.9 Centrale beremming

De centrale beremming kan door de gebruiker zelf worden bediend. Wanneer de hendel (C) naar beneden wordt gedrukt, is de rem ge-deblokkeerd. Als de hendel (C) naar boven staat, blokkeert de rem.


4.10 Kantelbeveiliging

Dekantelbeveiliging is in de hoogte verstelbaar. Om de hoogte in te stellen opent u hendel (D), plaatst u de kantelbeveiliging op de gewenste hoogte en sluit u de hendel weer.



4.11 Werkblad

Het werkblad is in hoogte en diepte instelbaar. Het instellen van de hoogte gebeurt met behulp van de verstelling van de armlenningen (zie **punt 3.6**). Voor de diepte-instelling draait u vleugelmoer (E) los en brengt u het werkblad in de gewenste positie. Om het werkblad naar opzij weg te klappen, bijv. bij het in- en uitstappen van de gebruiker, draait u de vleugelschroeven (E+F) los, zwenkt u het werkblad naar boven weg (G) en geleid het naar de zijkant van de eet-/werkstoel.

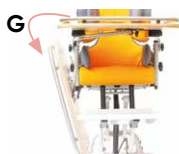

4. Toebehoren.


4.12 Knie-abductiewig

De knie-abductiewig dient met behulp van een steekas voor op de zitplaat te worden gemonteerd. Druk op knop (A) op de steekas dan kan de abductiewig eenvoudig worden afgenomen of geplaatst. Bij het plaatsen van de abductiewig moet deze met een duidelijke "klik" vastklikken.



4.13 Wielstandverlenging

De wielstandverlenging (B) is niet instelbaar! Ze wordt voor op het frame gestoken en dient alleen voor de stabiliteit.

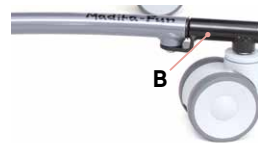

Draai na iedere instelling de verstellingen weer vast!

5. Reinigen en inspectie.


5.1 Reinigen en desinfecteren

5.1.1 Reiniging

Reinig alle frame-elementen regelmatig met een spons of vochtige doek, met name waterdruppels moeten worden verwijderd. Bij sterke verontreiniging moet de reiniging met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de gereinigde plaatsen goed droog te maken.

Alle stoffen die niet kunnen worden verwijderd, kunnen met een vochtige doek worden afgeveegd. Let bij alle verwijderbare stoffen op de ingenaaide onderhoudsetiketten (zoals **A+B**) op het betreffende element.

Neem onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en hygiëne in acht. Die vindt u op www.schuchmann.de/mediatheek.

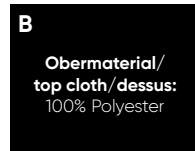

5. Reinigen en inspectie.

5.1.2 Desinfectie

Voor het desinfecteren van oppervlakken van de metalen en kunststof onderdelen kunnen verschillende producten worden gebruikt.

Vloeibare desinfectiemiddelen zijn verkrijgbaar als kant-en-klare-oplossing, die op een zachte doek moet worden gespotten en vervolgens gelijkmatig moet worden aangebracht. Als alternatief kan er ook gebruik worden gemaakt van doekjes die in een desinfectiemiddel zijn gedompeld en waarmee vervolgens de producten grondig worden afgeveegd. In beide gevallen moet erop worden gelet dat het product volledig nat wordt. Desinfectie in volautomatische desinfectie-installaties is ook mogelijk en wordt zelfs aanbevolen.

De inwerktijden kunnen variëren en kunnen uit de documentatie van de fabrikant worden gehaald.

5.2 Inspectie

Voer een dagelijkse zichtcontrole uit en controleer het product regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende onderdelen en storingen. Wend u zich bij een defect of storing rechtstreeks tot de dealer die u heeft geleverd (zie **punt 8.5**).

5.3 Onderhoud

Omwille van de veiligheid van de gebruiker en voor het behoud van de productaansprakelijkheid dient er minimaal eenmaal per jaar onderhoud te worden uitgevoerd door de dealer (zie **punt 8.5**). Het uitgevoerde onderhoud dient te worden vastgelegd in het onderhoudsschema (zie **punt 5.3.2**).

5.3.1 Aandachtspunten onderhoud

- Basisreiniging conform specificaties van de fabrikant
- Evt. desinfectie conform specificaties van de fabrikant
- Beschadigingen aan frame, aanbouwdelen en accessoires (scheuren, breuken, corrosie, verbogen of ontbrekende onderdelen)
- Sterkte van de verbindingen (losse schroeven vastdraaien, ontbrekende schroeven vervangen)
- Werking van de insteелеlementen (schroeven, ontgrendelhendel, voetpedaal)
- Werking van de overige insteелеlementen (glijlagers, rug, hoofdsteun, pe-lotten, armlenningen, voetensteunen, tafel en geleidingen bij de benen)
- Werking van de gasdrukveren (evt. aanpassing van de Bowden-kabel)
- Eventueel werking van de elektrische hoogte-instelling inclusief bekabeling controleren
- Werking van de beveiligingselementen (kantelbeveiliging)
- Correcte montage van de zitunit
- Werking van de remmen



5. Reinigen en inspectie.

- Werking van de looprollen (concentriciteit, lichte loop)
- Controle van de riemen op beschadigingen (klemmen, sluitingen, naden)
- Controle van de kussens en hoezen op beschadigingen
- Leesbaarheid van het typeplaatje
- Afsluitende volledige controle van de werking van het hulpmiddel
- Controle van de correcte bevestiging van alle aanbouwdelen en de bijbehorende accessoires

5.3.2 Onderhoudsplan

Aandachtspunten voor het onderhoud van de fabrikant (zie **punt 5.3.1**) werden uitgevoerd:

Datum	Bedrijf	Naam	Handtekening



Vastgestelde gebreken of beschadigingen moeten voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt zijn verholpen door de dealer of de fabrikant.

5. Reinigen en inspectie.

5.4 Reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen van de firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt en uw recht op garantie verliest.

Voor het bestellen van reserveonderdelen kunt u zich, met opgave van het serienummer van het product, tot uw leverancier wenden (zie **punt 8.5**). De benodigde vervangende onderdelen en accessoires mogen alleen door geschoold personeel worden gemonteerd.

5.5 Gebruiksduur en hergebruik

De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8" jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode nog steeds worden gebruikt, wanneer het zich in een veilige staat bevindt. De te verwachten gebruiksduur is niet van toepassing voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals zwenkwielen, gasdrukveren,... . Het onderhoud en de beoordeling van de staat, en in voorkomende gevallen het hergebruik, is voor de verantwoordelijkheid van de dealer.

Het product is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u het product doorgeeft de onder **punt 5.1** genoemde reinigings- en desinfectie-instructies uit. Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven. Voor hergebruik hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt aangeraden het product in te stellen op zijn meest compacte maten, om ruimte te besparen.




Wanneer er zich tijdens de gebruikstijd bij beoogd gebruik van het product een ernstig incident voordoet, moet dit onmiddellijk aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties worden gemeld.



6. Technische gegevens.

Afmetingen

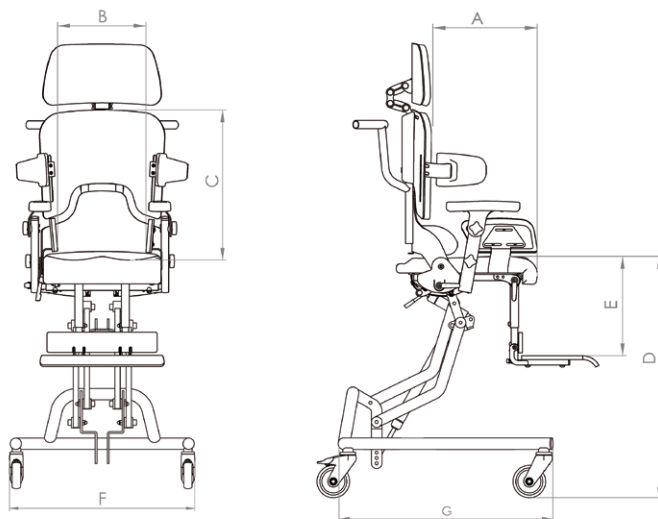

	Mt. 0	Mt. 1	Mt. 1b	Mt. 2
A Zitdiepte	15-25 cm	21-30 cm	26-36 cm	30-42 cm
B Zitbreedte	16-26 cm	20-30 cm	20-30 cm	28-38 cm
C Rughoogte met korte rug	35-43 cm	35-43 cm	42-52 cm	42-52 cm
C Rughoogte met lange rug	42-52 cm	42-52 cm	53-63 cm	53-63 cm
D Zithoogte	25-62 cm	25-62 cm	25-62 cm	25-62 cm
Zithoogte met elektr. hoogterverst.	32-62 cm	32-62 cm	32-62 cm	32-62 cm
Zithoogte met hydr. hoogterverst.	27-63 cm	27-63 cm	27-63 cm	27-63 cm
E Onderbeenlengte	17-24 cm	22-32 cm	27-38 cm	30-48 cm
F Totale breedte	54 cm	54 cm	64 cm	64 cm
G Lengte basisframe	61 cm	61 cm	75 cm	75 cm
Totale lengte met combi-onderstel	76 cm	76 cm	86 cm	86 cm
Zithoek	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°
Rughoek	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
Max. belasting	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
Gewicht	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg

7. Garantie.

Voor alle producten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Deze gaat in bij de aflevering of overdracht van de producten. Wanneer in deze periode aan het door ons geleverde product aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt zullen wij bij vrachtvrije terugzending naar ons, de gereclameerde schade bekijken en eventueel kosteloos en naar ons goeddunken repareren of nieuw leveren.



8. Identifizierung.

8.1 EU-conformitätsverklärung



schuchmann®

EU Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity



Firma / Company Schuchmann GmbH & Co. KG
 Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
 Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

„Bello 2.“ Therapiestuhl / *therapy chair*

Art.-Nr. / *Item-No.*: 74 00 100/NL2x, 74 01 000/NL2x, 74 01 100/NL2x, 74 02 000/NL2x

Basis UDI-DI / *Basic UDI-DI*: 4251040200004000740XXXXC5

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht:
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017


DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen
Technical aids for disabled persons

DIN EN ISO 14971:2013 Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Medical devices – Application of risk management to medical devices

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
 ist gültig bis zum 31.12.2023.

*This declaration of conformity applies only for products with above-named Item-numbers
 and is valid until 31.12.2023.*

Datum / *Date*: 01.04.2020

Unterschrift / *Sign*: 


Name / *Name*: Torsten Schuchmann

Funktion / *Function*: Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte / *Safety officer for medical devices*

8. Identificatie.

8.2 Serienummer/Productiedatum

Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt (**A**).

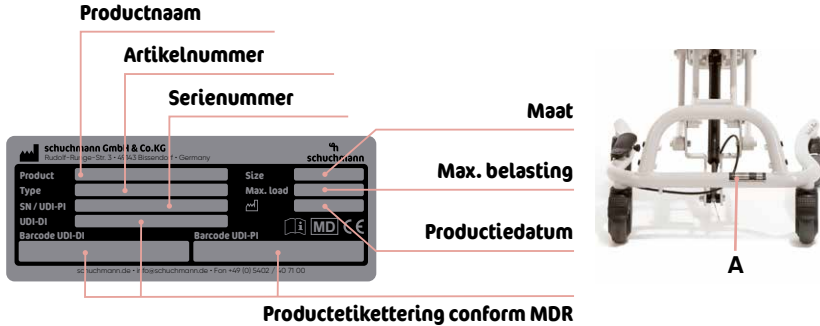

8.3 Productversie

De eet-/werkstoel **bello 2**, is verkrijgbaar in drie maten en kan met meerder toebehoren worden uitgebreid (zie **punt 3**).

8.4 Uitgave van het document

Gebruiksaanwijzing **bello 2**. - Wijzigingsstand E uitgave 04-2020

8.5 Naam en adres van de producent, uitleverende leverancier

Dit product werd geproduceerd door:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Duitsland
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dit product werd door de volgende dealer geleverd:



Korte Stukken 7 · 5371 MN Ravenstein · Netherlands
Tel. +31 (0)486/45 33 44
info@atlaskidtech.nl · www.atlaskidtech.nl





schuchmann.de